

# QC SOLUTION

## FINALIDADE:

Solução de controle de qualidade para Humalyte Plus<sup>3</sup> e Humalyte Plus<sup>5</sup>. Somente para diagnóstico de uso *in vitro*.

## IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Armazenar entre 5 e 35°C.

KCl	5,00 mmol/L
NaCl	97,6 mmol/L
Acetato de sódio	47,7 mmol/L
CaCl <sub>2</sub>	1,2 mmol/L

## PREPARO DOS REAGENTES:

A Solução é pronta para uso.

## ESTABILIDADE:

A solução é estável até o vencimento da data de validade quando armazenado entre 5 e 35°C. Não congelar e evitar contaminação. Depois de aberta, a solução é estável por 12 meses.

## TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

O fabricante garante a qualidade do produto se este for armazenado como descrito acima e em sua embalagem original.

## TRANSPORTE:

Não existem condições especiais para o transporte do produto.

## PRECAUÇÕES:

- Quando o reagente entra em contato com amostras ou controles, deve ser manuseado como potencialmente infectante e deve ser descartado de acordo com as regulamentações locais.
- Para o descarte seguro dos reagentes e materiais biológicos, sugerimos utilizar as regulamentações normativas locais, estaduais ou federais para a preservação ambiental.
- Os reagentes são irritantes para a pele. Em caso de contato com a pele, lavar a pele com muita água e, se a irritação persistir, consultar um médico.

## INSTALAÇÃO E PROCEDIMENTO:

Para a utilização correta da solução, ler as instruções detalhadas no Manual de Operação do equipamento.

## APRESENTAÇÃO:

CATÁLOGO	COMPONENTE	APRESENTAÇÃO
17470/70	QC solution	1 x 100mL

## DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefone: **08005919186** E-mail: [invitroms@invitro.com.br](mailto:invitroms@invitro.com.br)

N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE VIDE RÓTULO DO PRODUTO.

**Produzido por** Human GMBH Max-Planck-Ring 21, D 65205, Wiesbaden, Alemanha  
**e Distribuído por** In Vitro Diagnóstica Ltda. Rua Cromita, 278, Distrito Industrial. Itabira/MG. CEP: 35903-053.

Telefone: 31-3067-6400 E-mail: [invitroms@invitro.com.br](mailto:invitroms@invitro.com.br)

Resp. Téc.: Patrícia C. C. Vilela – CRF 4463

Nº Notificação M.S. 10303460395 Classe de Risco: I

## SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO



Data limite de utilização



Limites de temperatura (conservar entre)



Número do Catálogo



Consultar Instrução de Uso



Número do lote



Produto Diagnóstico In Vitro