

# CUVETTE CLEAN

## FINALIDADE:

Reagente utilizado para limpeza das cuvetas depois de testes com reagentes específicos (imunoturbidimétricos, látex aprimorado, etc), realizados no HumaStar 300SR e HumaStar 600. Somente para diagnóstico de uso *in vitro*. Uso profissional. Automatizado. Uso em laboratórios de patologia e análises clínicas.

## IDENTIFICAÇÃO:

**C-CLEAN: 6 x 55 mL** pH >13

NaOH	± 2%
Sulfonatos alcalinos secundários	<2%
Detergente	5 <10%

## PRECAUÇÕES:

- Em caso de contato desta solução com a pele ou mucosa, lavar com bastante água e procurar um médico;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com bastante água por vários minutos. Remover lentes de contatos, se presentes e for fácil a retirada. Continuar a lavar.
- Como não se pode assegurar que amostras biológicas e soros controle não transmitem infecções, recomenda-se manuseá-los de acordo com as normas de biossegurança;
- Todo o material contendo amostras de pacientes ou controles deve ser inativado por procedimentos validados (autoclavação ou tratamento químico).
- Para o descarte seguro dos reagentes e materiais biológicos, sugerimos utilizar as regulamentações normativas locais, estaduais ou federais para a preservação ambiental.
- A solução CUVETTE CLEAN não possui hidróxido de sódio em quantidade suficiente para classificá-la como irritante.
- Os riscos residuais do kit, de acordo com critérios pré-determinados, são aceitáveis em comparação aos benefícios proporcionados pelo uso. A análise de risco foi realizada de acordo com a ISO 14971, relacionada à data final e levando em consideração a atual informação de registro.

## NOTA:

Ao transferir a solução, use apenas um pipetador. Não pipete com a boca!

## PREPARO DO REAGENTE E ESTABILIDADE:

A solução é pronta para uso e estável até o vencimento da data de validade quando armazenado entre 2 e 25°C. Não congelar e evitar contaminação.

## INSTALAÇÃO:

Para a utilização correta do C-CLEAN, ler a instrução de uso do kit e as instruções detalhadas no Manual de Operação dos equipamentos.

## TRANSPORTE:

Não existem condições especiais para o transporte do produto.

## APRESENTAÇÃO:

CATÁLOGO	COMPONENTE	APRESENTAÇÃO
16663/20	C-CLEAN	6 x 55 mL

## DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefax (31) 3067-6400 E-mail: [invitroms@invitro.com.br](mailto:invitroms@invitro.com.br)

N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE VIDE RÓTULO DO PRODUTO.

**Produzido por** Human GMBH Max-Planck-Ring 21, D 65205, Wiesbaden, Alemanha

**e Distribuído por** Human do Brasil. Rua Cromita, 278, Distrito Industrial.

Itabira/MG. CEP: 35903-053. Telefone: 31-3067-6400 – Fax: 31-3067-6401

e-mail: [invitroms@invitro.com.br](mailto:invitroms@invitro.com.br)

Resp. Téc.: Patrícia C. C. Vilela – CRF 4463

Reg. M.S. 10303460339 Classe de Risco: I

## SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO



Data limite de utilização (primeiro dia do mês)



Limites de temperatura (conservar entre)



Número do Catálogo



Consultar Instrução de Uso



Número do lote



Produto Diagnóstico In Vitro