

# HCB – DIL

## FINALIDADE:

Reagente utilizado na calibração e manuseio dos equipamentos da linha HUMACOUNT e HUMACOUNT TS. É uma solução salina isotônica usada para diluir amostras de sangue total e rinsar o sistema fluido entre procedimentos de medida. Somente para diagnóstico de uso *in vitro*.

## IDENTIFICAÇÃO:

### DIL – Diluente

NaCl	< 10 g/L
Sulfato de Sódio	< 15 g/L
Conservante	< 2,5 g/L

## PRECAUÇÕES:

- Deixar o reagente em temperatura ambiente por no mínimo 24 horas antes do uso.
- O reagente foi otimizado para o sistema HUMACOUNT. Uso de água ou mistura com a terça parte do reagente podem causar resultados inadequados.
- O reagente não possui substâncias perigosas em quantidade que deva ser relatada. No caso de contato com a pele ou olhos enxaguar com água.
- Amostras, controles e material que entrem em contato com o reagente devem ser manuseados como potencialmente infectantes e devem ser descartados de acordo com as regulamentações locais.
- Para o descarte seguro dos reagentes e materiais biológicos, sugerimos utilizar as regulamentações normativas locais, estaduais ou federais para a preservação ambiental.
- Os riscos residuais do kit, de acordo com critérios pré-determinados, são aceitáveis em comparação aos benefícios proporcionados pelo uso. A análise de risco foi realizada de acordo com a ISO 14971, relacionada à data final e levando em consideração a atual informação de registro.

## PREPARO DO REAGENTE E ESTABILIDADE:

O reagente é pronto para uso e estável até o vencimento da data de validade quando armazenado entre 15 e 30°C, protegido de luz direta.

Instabilidade devido a contaminação é na maioria das vezes indicada por turvação ou mudança de coloração. Este reagente deverá ser então substituído.

**NÃO CONGELAR.** Trocar o reagente se congelado.

## INSTALAÇÃO:

Para a instalação correta do **Diluente**, ler as instruções detalhadas no Manual de Operação do equipamento.

## TRANSPORTE:

Não existem condições especiais para o transporte do produto.

## APRESENTAÇÃO:

CATÁLOGO	COMPONENTE	APRESENTAÇÃO
70000	Diluente	1 x 20 L

## DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefone: **08005919186** E-mail: [invitroms@invitro.com.br](mailto:invitroms@invitro.com.br)

N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE VIDE RÓTULO DO PRODUTO.

**Produzido e Distribuído por** In Vitro Diagnóstica Ltda.

Rua Cromita, 278, Distrito Industrial – Itabira/MG. CEP: 35903-053

Telefone: 31-3067-6400 E-mail: [invitroms@invitro.com.br](mailto:invitroms@invitro.com.br)

Resp. Téc.: Patrícia C. C. Vilela – CRF 4463

Nº de Notificação M.S. 10303460432 Classe de Risco: I

## SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO



Data limite de utilização (primeiro dia do mês)



Limites de temperatura (conservar entre)

**REF**

Número do Catálogo



Consultar Instrução de Uso

**LOT**

Número do lote

**IVD**

Produto Diagnóstico In Vitro