

# HCB – DIL

## FINALIDADE:

Reagente utilizado na calibração e manuseio dos equipamentos da linha HUMACOUNT e HUMACOUNT TS. É uma solução salina isotônica usada para diluir amostras de sangue total e rinsar o sistema fluido entre procedimentos de medida. Somente para diagnóstico de uso in vitro.

## IDENTIFICAÇÃO:

### DIL – Diluente

NaCl	< 10 g/L
Sulfato de Sódio	< 15 g/L
Conservante	< 2,5 g/L

## PRECAUÇÕES:

- Deixar o reagente em temperatura ambiente por no mínimo 24 horas antes do uso.
- O reagente foi otimizado para o sistema HUMACOUNT. Uso de água ou mistura com a terça parte do reagente podem causar resultados inadequados.
- O reagente não possui substâncias perigosas em quantidade que deva ser relatada. No caso de contato com a pele ou olhos enxaguar com água.
- Amostras, controles e material que entrem em contato com o reagente devem ser manuseados como potencialmente infectantes e devem ser descartados de acordo com as regulamentações locais.
- Para o descarte seguro dos reagentes e materiais biológicos, sugerimos utilizar as regulamentações normativas locais, estaduais ou federais para a preservação ambiental.

## PREPARO DO REAGENTE E ESTABILIDADE:

O reagente é pronto para uso e estável até o vencimento da data de validade quando armazenado entre 15 e 30°C, protegido de luz direta.

Instabilidade devido a contaminação é na maioria das vezes indicada por turvação ou mudança de coloração. Este reagente deverá ser então substituído.

**NÃO CONGELAR.** Trocar o reagente se congelado.

## INSTALAÇÃO:

Para a instalação correta do **Diluente**, ler as instruções detalhadas no Manual de Operação do equipamento.

## TRANSPORTE:

Não existem condições especiais para o transporte do produto.

## APRESENTAÇÃO:

CATÁLOGO	COMPONENTE	APRESENTAÇÃO
70000	Diluente	1 x 20 L

## DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefax (31) 3067-6400 E-mail: [invitroms@invitro.com.br](mailto:invitroms@invitro.com.br)

N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE VIDE RÓTULO DO PRODUTO.

**Produzido e Distribuído por** In Vitro Diagnóstica Ltda  
Rua Cromita, 278, Distrito Industrial – Itabira/MG. CEP: 35903-053

Telefone: 31-3067-6400 – Fax: 31-3067-6401

e-mail: [invitroms@invitro.com.br](mailto:invitroms@invitro.com.br)

Resp. Téc.: Patrícia C. C. Vilela – CRF 4463

Reg. M.S. 10303460432

## SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO



Data limite de utilização (primeiro dia do mês)



Limites de temperatura (conservar entre)



Número do Catálogo



Consultar Instrução de Uso



Número do lote



Produto Diagnóstico In Vitro