

HCB – LIM

FINALIDADE:

Solução de limpeza utilizada para realizar o processo de limpeza do sistema flúídico dos equipamentos HUMACOUNT e HUMACOUNT TS. Somente para diagnóstico de uso *in vitro*.

IDENTIFICAÇÃO:

REAGENTE DE LIMPEZA

Alquifenolpolioxietileno < 15%
Proteínase < 1%

PRECAUÇÕES:

- Deixar o reagente em temperatura ambiente por no mínimo 24 horas antes do uso.
- O reagente foi otimizado para o sistema HUMACOUNT. Uso de água ou mistura com a terça parte do reagente podem causar resultados inadequados.
- O reagente não possui substâncias perigosas em quantidade que deva ser relatada. No caso de contato com a pele ou olhos enxaguar com água.
- Amostras, controles e material que entrem em contato com o reagente devem ser manuseados como potencialmente infectantes e devem ser descartados de acordo com as regulamentações locais.
- Para o descarte seguro dos reagentes e materiais biológicos, sugerimos utilizar as regulamentações normativas locais, estaduais ou federais para a preservação ambiental.
- Os riscos residuais do kit, de acordo com critérios pré-determinados, são aceitáveis em comparação aos benefícios proporcionados pelo uso. A análise de risco foi realizada de acordo com a ISO 14971, relacionada à data final e levando em consideração a atual informação de registro.

PREPARO DO REAGENTE E ESTABILIDADE:

O reagente é pronto para uso e estável até o vencimento da data de validade quando armazenado entre 15 e 30°C protegido da luz.

NÃO CONGELAR. Trocar o reagente se congelado.

INSTALAÇÃO:

Para a instalação correta do **Reagente de Limpeza**, ler as instruções detalhadas no Manual de Operação do equipamento.

TRANSPORTE:

Não existem condições especiais para o transporte do produto.

APRESENTAÇÃO

CATÁLOGO	COMPONENTE	APRESENTAÇÃO
72000	Reagente de Limpeza	1 x 1L

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefone: **31-3067-6400** E-mail: invitroms@invitro.com.br

N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE VIDE RÓTULO DO PRODUTO.

Fabricante: In Vitro Diagnóstica Ltda. Rua Cromita, 278, Distrito Industrial, Itabira/MG. CEP: 35903-053.

Regularizado por: In Vitro Diagnóstica Ltda. Rua Cromita, 278, Distrito Industrial, Itabira/MG. CEP: 35903-053. CNPJ: 42.837.716/0001-98.

Telefone: 31-3067-6400 E-mail: invitroms@invitro.com.br

Resp. Téc.: Patrícia C. C. Vilela – CRF 4463

ANVISA: 10303460433 Classe de Risco: I

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO



Data limite de utilização (primeiro dia do mês)



Limite de temperatura (conservar a)



Número do Catálogo



Consultar Instrução de Uso



Número do lote



Produto Diagnóstico In Vitro



Data de Fabricação