

## GUIA RÁPIDO

Leia todas as instruções antes de realizar o teste.


### PROCEDIMENTO DO TESTE

#### Antes de iniciar o teste:

1. Antes de iniciar o teste, a amostra e os reagentes do kit devem estar em temperatura ambiente (15 – 30°C).
2. Não abra nenhum material antes de ler todas as informações contidas neste Guia Rápido e na Instrução de Uso.
3. Escolha um lugar em que poderá realizar o teste tranquilamente por 15 minutos. O local deve ser iluminado, arejado e distante de outras pessoas.
4. Você precisa ter um relógio ou cronômetro (pode usar o do celular) para marcar o tempo para leitura do teste.
5. Coloque todos os itens do kit sobre uma mesa limpa.
6. Confira se tem 1 unidade de cada material para realizar o autoteste: 1 Dispositivo de Teste; 1 Diluente; 1 Swab (Estéril); 1 Saco Plástico para Descarte.



Dispositivo de teste

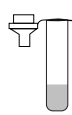

Diluente



Swab (Estéril)



Instrução de Uso



Saco Plástico para Descarte



Guia Rápido

7. Não realize o teste se notar que a embalagem estava aberta ou se faltar algum item. Não use o teste após a data de validade indicada na embalagem do produto.
8. Os materiais são de uso individual e único. Não reutilize os componentes para outros testes ou para fins diferentes dos descritos nesta instrução de uso.
9. Para apresentações com mais de 1 teste, mantenha cada material armazenado na embalagem até o momento do uso.

#### Iniciando o teste:

10. Higienize bem as mãos com água e sabão ou passe álcool 70%.



Aponte a câmera do seu smartphone para o QR CODE ao lado e confira o procedimento.

11. Abra o orifício na parte superior direita da caixa para apoiar o tubo com diluente. Retire o lacre da tampa do tubo com diluente. Após aberto, coloque o tubo com diluente no suporte da caixa com cuidado para não derramar o líquido.



#### Coleta de amostra

12. Faça a coleta da amostra (nasal anterior) utilizando o swab conforme abaixo:


A coleta deve ser realizada em ambiente arejado e distante de outras pessoas, pois o procedimento pode causar espirros levando a contaminação de pessoas próximas.

A coleta deve ser realizada pelo usuário do teste. Porém, o autoteste em menores de 14 anos deve ser feito sob a supervisão de um adulto.

Abra o swab estéril pela parte contrária ao cotonete (algodão). Não encoste na ponta do swab que contém o algodão.


Insira o swab em uma das narinas até sentir uma leve resistência (máximo 2,5 cm da borda da narina).

Gire lentamente o swab dentro da narina, passando por 5 vezes entre as paredes nasais. Usando o mesmo swab, repita este processo na outra narina.

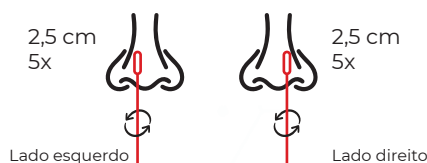


#### Realização do teste:

13. Insira o Swab (ponta do algodão) com a amostra no tubo com diluente. Gire o Swab 5 vezes para diluir bem a amostra. Certifique-se de que o tubo esteja em pé e que o Swab atinja o fundo do tubo com diluente. **Obs.: Gire mais vezes se a amostra estiver viscosa.**

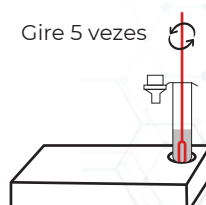


14. Deixe o Swab dentro do tubo com diluente durante 1 minuto e, em seguida, retire o Swab e o descarte. Feche o tubo com a tampa conta-gotas.

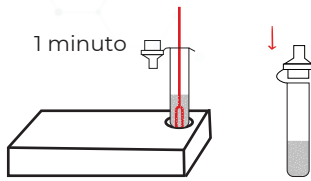

15. Abra a embalagem de alumínio, retire o dispositivo de teste e coloque-o na horizontal sobre uma superfície lisa.

16. Segure o frasco com o diluente verticalmente. Pingue 2 gotas do diluente com a amostra no poço de amostra do dispositivo de teste, indicado com a letra S.

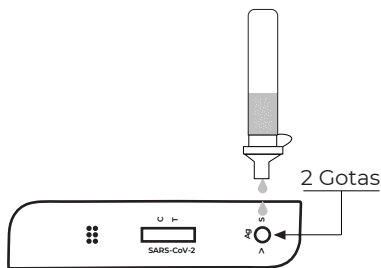

## Leitura do resultado:

17. Aguarde 15 minutos para interpretação dos resultados. Não interpretar o resultado após 20 minutos.



## Descarte:

18. Após a interpretação do resultado do teste, use o saco plástico para descartar todo o material em lixo comum.

19. Higienize bem as mãos com água e sabão ou passe álcool 70%.

## INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

### Resultado Negativo / Não Reagente

Se aparecer somente a linha Controle (C) indica que o teste é negativo / não reagente.



#### O que significa?

Um resultado negativo/não reagente significa que no momento do teste o antígeno SARS-CoV-2, vírus que causa a COVID-19, não foi encontrado em sua amostra.

#### O que fazer?

O resultado negativo/não reagente do autoteste não descarta que o indivíduo esteja contaminado com o

SARS-CoV-2, caso o teste tenha sido realizado dentro do período de incubação viral. Se houver o aparecimento ou se persistirem os sintomas, deve-se realizar um novo teste ou procurar atendimento em uma unidade de saúde. Continue seguindo as recomendações de segurança para evitar a propagação do vírus.

### Resultado Positivo / Reagente

Se aparecer a linha Controle (C) e a linha Teste (T) indica que o teste é positivo/reagente. A **intensidade da cor vermelha** na região da linha de teste (T) poderá variar, portanto, mesmo uma linha com coloração fraca ou não uniforme deve ser considerada se o procedimento foi realizado corretamente e a leitura deve ser interpretada como positiva/reagente.



#### O que significa?

Um resultado positivo/reagente significa que muito provavelmente você tenha COVID-19.

#### O que fazer?

Você deve se isolar e manter todos os cuidados para evitar a disseminação do vírus para outras pessoas. Procure atendimento em uma unidade de saúde ou teleatendimento o mais rápido possível para confirmar o diagnóstico, receber orientações e permitir a notificação nos sistemas do Ministério da Saúde para o acompanhamento dos casos de COVID-19 no Brasil.

### Resultado Inválido

Se a linha de controle (C) não aparecer, o teste é inválido mesmo com o aparecimento da linha teste (T).

A linha controle (C) deverá sempre aparecer se o procedimento for realizado corretamente.



#### O que significa?

Um resultado inválido significa que o seu teste teve um erro.

#### Motivo do erro?

Houve erro na execução de alguma etapa da técnica. A amostra estava viscosa, foi insuficiente ou excessiva. A leitura do resultado foi feita fora do tempo necessário. Falha na corrida do dispositivo de teste ou não funcionamento adequado de algum item do kit.

#### O que fazer?

É necessário que o autoteste seja feito novamente em um novo dispositivo, seguindo corretamente todas as informações contidas nesta instrução de uso.

Se preferir, procure um laboratório/farmácia para realizar o teste através de um profissional ou procure uma unidade de saúde para melhor orientação.

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

✉ [invitroms@invitro.com.br](mailto:invitroms@invitro.com.br)

☎ 08005919186

DISQUE SAÚDE - 136

Reg. M.S.: 10303460525

Revisão: Abril/2022 | [www.invitro.com.br](http://www.invitro.com.br)

InVITro

#CUIDANDODOFUTUROJUNTOS