

# HUMACLOT PRO – WASH SOLUTION

## FINALIDADE:

O HumaClot Pro – Wash Solution é destinado para limpeza da agulha do pipetador para evitar contaminação no equipamento HumaClot Pro.

Somente para diagnóstico de uso *in vitro*.

## IDENTIFICAÇÃO:

**Wash Solution** **WASH**: 5 x 15 mL pH 2,0 – 2,4

Solução salina tamponada	25 %
HCL	0,1 mol/L
Imidazol	0,1 mol/L
Detergente	0,02 %

## PREPARO DO REAGENTE:

**WASH** está pronto para o uso. Não agitar.

Se necessário, aguarde até que as bolhas e a espuma desapareçam. Para mais informações, por favor, consulte o manual do usuário do HumaClot Pro. Possível precipitação pode ser dissolvida por aquecimento a 37°C durante 5 minutos.

## ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE:

WASH é estável até a data de validade quando armazenado de 18...25°C e protegido da luz. Não é recomendado armazenar abaixo de 15°C. Em caso de formação de precipitado, dissolver aquecendo em banho-maria. Não congelar. Evitar contato e reação do concentrado com o ar. Estabilidade do frasco aberto é de 14 dias de 15...30°C.

## INSTALAÇÃO:

Para a utilização correta do WASH, ler as instruções detalhadas no Manual de Operação do equipamento.

## TRANSPORTE:

Não existem condições especiais para o transporte do produto.

## PRECAUÇÕES:

- Em caso de contato com a pele e mucosas das membranas, lave abundantemente com água. Pode prejudicar o feto. Consulte um médico se houver exposição.
- Usar jaleco de laboratório, óculos de proteção e luvas descartáveis durante o manuseio.
- Mantenha no frasco original. Armazenar em local seguro.
- Os resíduos produzidos quando se utiliza a solução devem ser considerados como um potencial perigo biológico e devem ser manuseados com cuidado.
- Siga as regulamentações locais para os procedimentos de eliminação de resíduos.
- Os riscos residuais do kit, de acordo com critérios pré-determinados, são aceitáveis em comparação aos benefícios proporcionados pelo uso. A análise de risco foi realizada de acordo com a ISO 14971, relacionada à data final e levando em consideração a atual informação de registro.

## APRESENTAÇÃO:

CATÁLOGO	COMPONENTE	APRESENTAÇÃO
15800/20	WASH	5 x 15 mL

## DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefone: **31-3654-6366** E-mail: [invitroms@invitro.com.br](mailto:invitroms@invitro.com.br)

N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE VIDE RÓTULO DO PRODUTO.

**Fabricado por:** Human GmbH, Max-Planck-Ring 21, D 65205, Wiesbaden, Alemanha.

**Regularizado por:** In Vitro Diagnóstica Ltda. Rua Cromita, 278, Distrito Industrial, Itabira/MG. CEP: 35903-053. CNPJ: 42.837.716/0001-98.

Telefone: 31-3067-6400 E-mail: [invitroms@invitro.com.br](mailto:invitroms@invitro.com.br)

Resp. Téc.: Patrícia C. C. Vilela – CRF 4463

## SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO



Data limite de utilização (primeiro dia do mês)



Limites de temperatura (conservar entre)



Número do Catálogo



Consultar Instrução de Uso



Número do lote



Produto Diagnóstico In Vitro