

Precisão**Repetibilidade**

N	Média (mg/dL)	DP (mg/dL)	% CV
25	4,93	0,06	1,24
25	8,73	0,09	1,0

Reprodutibilidade

N	Média (mg/dL)	DP (mg/dL)	% CV
25	4,48	0,16	3,62
25	10,02	0,33	3,30

Sensibilidade Analítica

A sensibilidade analítica do teste é de 0,075 mg/dL.

Linearidade

O teste é linear na concentração de 20 mg/dL ou 1190 µmol/L. Diluir amostras com uma concentração alta 1 + 1 com salina fisiológica (0,9%). Multiplicar o resultado por 2.

Interferentes

- O teste não é influenciado por hemoglobina até 100 mg/dL ou por triglicérides até 2500 mg/dL. Bilirrubina e ácido ascórbico levam a reduzida recuperação de ácido úrico. Soros ictericos e de pacientes em terapia com vitamina C não devem ser usados no teste.
- Podem ocorrer falsos resultados baixos de ácido úrico em amostras de pacientes tratados com N-acetilcisteína (NAC, o tratamento de uma overdose de paracetamol), N-acetil-pbenzoquinona imina e/ou metamizol. Coleta de sangue deve ser realizada antes da administração de metamizol.

APRESENTAÇÃO DO KIT

APRESENTAÇÃO DO KIT				
Nº CAT	REAGENTE	VOLUME		
800-3	<table><tr><td>RGT</td></tr><tr><td>STD</td></tr></table>	RGT	STD	3 x 60 mL 1 x 3 mL
RGT				
STD				

BIBLIOGRAFIA

1. Barham, D., Trinder, P., Analyst, 97, 142 (1972)
2. Fossati, P. et al., Clin. Chem. 26/2, 227 (1980)
3. Thefeld, L., et al, Dtsch. Med. Wschr., 98, 380-384 (1973)
4. In Vitro Diagnóstica – Documentos internos.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefone: +55(31) 3067-6400 E-mail: invitroms@invitro.com.br

N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE VIDE RÓTULO DO PRODUTO.

Fabricado e Regularizado por: In Vitro Diagnóstica Ltda. Rua Cromita, 278, Distrito Industrial, Itabira/MG. CEP: 35903-053. CNPJ: 42.837.716/0001-98.

Telefone: +55(31) 3067-6400 e-mail: invitroms@invitro.com.br

Resp. Téc.: Patrícia C. C. Vilela – CRF 4463

ANVISA: 10303460570 Classe de Risco: II

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO

Data limite de utilização



Limite de temperatura (conservar a)



Número do Catálogo



Consultar Instrução de Uso



Número do lote



Produto Diagnóstico In Vitro



Data de Fabricação