

Precisão

Repetibilidade

	N	Média	DP	CV%
Amostra 1	10	3,54	0,04	1,2
Amostra 2	10	5,56	0,05	0,9

Reprodutibilidade

	N	Média	DP	CV%
Amostra 1	10	3,58	0,09	2,53
Amostra 2	10	5,47	0,18	3,29

Sensibilidade Analítica

A partir da média do desvio-padrão do resultado encontrado da imprecisão dia-a-dia a 25°C (reprodutibilidade), a sensibilidade pode ser calculada utilizando 3 desvios padrões (DP): Sensibilidade ($3 \times DP = 0,09 \text{ g/dL}$): $3 \times 0,09 = 0,27 \text{ g/dL}$.

Linearidade

O teste é linear até a concentração de 6 g/dL. Para valores maiores diluir a amostra com NaCl 0,85%, efetuar nova determinação e multiplicar o valor obtido pelo fator de diluição empregado.

Interferentes

Nenhuma interferência na Albumina foi detectada até as seguintes concentrações:

Substância Interferente	
Ácido ascórbico	até 20 mg/dL
Bilirrubina	até 20 mg/dL
Lípídeos	até 600 mg/dL (intralípídeos)

Recuperação em soro controle

Soro Controle	Valor alvo, g/dL	Média do valor recuperado	Recuperação, %
Soro 1	4,47	4,79	107
Soro 2	3,0	3,3	110

APRESENTAÇÃO DO KIT

Cat. Nº	Reagente	Volume
801-2	RGT PAD	2 x 60 mL 1 x 3 mL

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefone: +55(31) 3067-6400 e-mail: invitroms@invitro.com.br

N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE VIDE RÓTULO DO PRODUTO.

BIBLIOGRAFIA

- 1- Meulemans O.: Clin. Chem. Acta, 5:757, 1960
- 2- Doumas, B.T.: Clin. Chem. Acta, 31:81, 1971
- 3- Pennock, C.A.: Clin. Path. 25:518, 1968
- 4- Henry, R.J.: Clin. Chem. - Principles and Technics, 2ª Ed. Harper and Row, 1974.
- 5- Annino, J.S.: Clinical Chemistry - Principles and Procedures, 4ª ed. Little, Brown and Company.
- 6- Tonks, D.B.: Quality Control in Clinical Laboratories, Diagnostics Reagents Division, Ontario, 1970.
- 7- Moura, R.A.A.: Técnicas de Laboratório, 2ª ed. Atheneu.

Fabricado e Regularizado por: In Vitro Diagnóstica Ltda. Rua Cromita, 278, Distrito Industrial, Itabira/MG. CEP: 35903-053. CNPJ: 42.837.716/0001-98.
Telefone: +55(31) 3067-6400 e-mail: invitroms@invitro.com.br
Resp. Téc.: Patrícia C. C. Vilela – CRF 4463
ANVISA: 10303460569 Classe de Risco: II

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO

	Data limite de utilização
	Limite de temperatura (conservar a)
	Número do Catálogo
	Consultar Instrução de Uso
	Número do lote
	Produto Diagnóstico In Vitro
	Data de Fabricação